

## RespoSorb® Silicone Border

### Pansement hydrocellulaire stérile auto-adhésif avec interface siliconée

Référence	Taille ou dimensions
413000	8 x 8 cm - carré
413001	10 x 10 cm - carré
413002	12,5 x 12,5 cm - carré
413003	15 x 15 cm - carré
413004	16 x 26 cm - rectangle
413005	20 x 20 cm - carré
413006	18 x 18 cm - sacrum
413007	23 x 23 cm - sacrum
413008	13 x 15,5 cm - ovale
413009	12 x 23 cm - ovale
413010	25 x 25 cm - talon
413022	17,5 x 17,5 cm - carré



### Produit


RespoSorb® Silicone Border est un pansement hydrocellulaire siliconé, auto-adhésif, stérile, à usage unique pour le traitement à long terme des plaies aiguës et chroniques, avec des niveaux modérés à élevés d'exsudats.

### Indications / Classification

RespoSorb® Silicone Border est indiqué pour le traitement de nombreux types de plaies présentant des exsudats modérés à abondants : plaies aiguës (brûlures, plaies post-opératoires, plaies traumatiques) et plaies chroniques (ulcères veineux de jambe, escarres, pieds diabétiques, plaies tumorales). Il est utilisé chez l'adulte par les professionnels de santé, en milieu clinique ou à domicile.

RespoSorb® Silicone Border est un dispositif médical de classe IIb (TÜV-0123).

### Spécifications

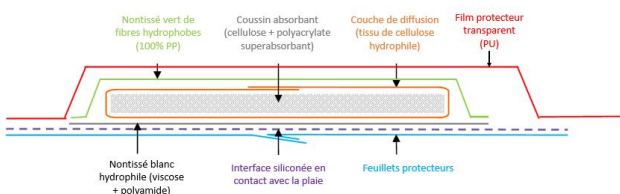

#### Composition :

- Une couche de contact avec la plaie en silicone perforé, qui facilite l'application du pansement et favorise la non-adhérence à la plaie.
- Un coussin absorbant, composé de cellulose et de polyacrylate superabsorbant (SAP) qui permet d'absorber et de retenir les exsudats, et qui est enveloppé dans un tissu de cellulose hydrophile destiné à distribuer le liquide dans le coussin absorbant.
- Un dos en non-tissé de couleur verte, en polypropylène, hydrophobe, qui indique la face opposée à la plaie.
- Un film protecteur externe semi-perméable en polyuréthane, perméable à l'air mais imperméable à l'eau, ce qui permet au patient de prendre sa douche.

#### Caractéristiques :

Capacité d'absorption : minimum 40 g/100cm<sup>2</sup> de coussin absorbant (norme NF EN 13726-1 chapitre 3.3).

Remboursé LPPR. Les pansements RespoSorb® Silicone Border sont pris en charge par la Sécurité Sociale dans la catégorie des pansements hydrocellulaires à absorption importante.

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
<b>413000</b>	8 x 8 cm - carré	Dimensions du pansement : 8 x 8 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 3,5 x 3,5 cm environ
<b>413001</b>	10 x 10 cm - carré	Dimensions du pansement : 10 x 10 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 5 x 5 cm environ
<b>413002</b>	12,5 x 12,5 cm - carré	Dimensions du pansement : 12,5 x 12,5 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 7,5 x 7,5 cm environ
<b>413003</b>	15 x 15 cm - carré	Dimensions du pansement : 15 x 15 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 9,5 x 9,5 cm environ
<b>413004</b>	16 x 26 cm - rectangle	Dimensions du pansement : 16 x 26 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 10,5 x 20,5 cm environ
<b>413005</b>	20 x 20 cm - carré	Dimensions du pansement : 20 x 20 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 14,5 x 14,5 cm environ
<b>413006</b>	18 x 18 cm - sacrum	Dimensions du pansement : 18 x 18 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 12,6 x 12,6 cm environ
<b>413007</b>	23 x 23 cm - sacrum	Dimensions du pansement : 23 x 23 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 17,6 x 17,6 cm environ
<b>413008</b>	13 x 15,5 cm - ovale	Dimensions du pansement : 13 x 15,5 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 7,5 x 10 cm environ
<b>413009</b>	12 x 23 cm - ovale	Dimensions du pansement : 12 x 23 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 6,5 x 17,5 cm environ
<b>413010</b>	25 x 25 cm - talon	Dimensions du pansement : 25 x 25 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 18,6 x 17,2 cm environ
<b>413022</b>	17,5 x 17,5 cm - carré	Dimensions du pansement : 17,5 x 17,5 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 12,1 x 12,1 cm environ

Absence de latex.

## Présentation / Conditionnement

Unitaire sous pochette papier/film pelable.  
Conditionnement en boîte puis en carton.

Accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / blister	Nb blisters / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
<b>413000</b>	8 x 8 cm - carré	1	10	6	128
<b>413001</b>	10 x 10 cm - carré	1	10	6	128
<b>413002</b>	12,5 x 12,5 cm - carré	1	10	6	80
<b>413003</b>	15 x 15 cm - carré	1	10	6	80
<b>413004</b>	16 x 26 cm - rectangle	1	10	6	32
<b>413005</b>	20 x 20 cm - carré	1	10	6	48
<b>413006</b>	18 x 18 cm - sacrum	1	10	6	48
<b>413007</b>	23 x 23 cm - sacrum	1	10	6	32
<b>413008</b>	13 x 15,5 cm - ovale	1	10	6	80
<b>413009</b>	12 x 23 cm - ovale	1	10	6	64
<b>413010</b>	25 x 25 cm - talon	1	10	6	32
<b>413022</b>	17,5 x 17,5 cm - carré	1	10	6	48

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions blister	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
<b>413000</b>	8 x 8 cm - carré	150 x 135 mm	141 x 68 x 160 mm	289 x 183 x 223 mm	1200 x 800 x 1934 mm
<b>413001</b>	10 x 10 cm - carré	150 x 135 mm	141 x 68 x 160 mm	289 x 183 x 223 mm	1200 x 800 x 1934 mm
<b>413002</b>	12,5 x 12,5 cm - carré	205 x 185 mm	191 x 68 x 215 mm	397 x 237 x 223 mm	1200 x 800 x 1934 mm
<b>413003</b>	15 x 15 cm - carré	205 x 185 mm	191 x 68 x 215 mm	397 x 237 x 223 mm	1200 x 800 x 1934 mm
<b>413004</b>	16 x 26 cm - rectangle	320 x 255 mm	261 x 68 x 330 mm	545 x 353 x 223 mm	1200 x 800 x 1934 mm
<b>413005</b>	20 x 20 cm - carré	250 x 235 mm	241 x 68 x 260 mm	543 x 263 x 223 mm	1200 x 800 x 1934 mm
<b>413006</b>	18 x 18 cm - sacrum	250 x 235 mm	241 x 68 x 260 mm	543 x 263 x 223 mm	1200 x 800 x 1943 mm
<b>413007</b>	23 x 23 cm - sacrum	300 x 285 mm	291 x 68 x 310 mm	596 x 333 x 223 mm	1200 x 800 x 1943 mm
<b>413008</b>	13 x 15,5 cm - ovale	205 x 185 mm	191 x 68 x 215 mm	397 x 237 x 223 mm	1200 x 800 x 1934 mm
<b>413009</b>	12 x 23 cm - ovale	280 x 155 mm	161 x 68 x 290 mm	596 x 184 x 223 mm	1200 x 800 x 1943 mm
<b>413010</b>	25 x 25 cm - talon	300 x 285 mm	291 x 68 x 310 mm	596 x 333 x 223 mm	1200 x 800 x 1943 mm
<b>413022</b>	17,5 x 17,5 cm - carré	250 x 235 mm	241 x 68 x 260 mm	543 x 263 x 223 mm	1200 x 800 x 1943 mm

## **Stérilisation**

A l'oxyde d'éthylène.  
Durée de vie : 3 ans.

## **Précautions d'emploi**

Se référer à la notice d'emploi.

## **Contre-indications**

Ne pas utiliser RespoSorb® Silicone Border si le patient présente une hypersensibilité à l'un de ses composants.

Effets secondaires : Se référer à la notice d'emploi.

## **Conditions de stockage**

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à plat, à l'abri de la lumière du soleil.