


Atrauman® Ag

Pansements imprégnés d'argent

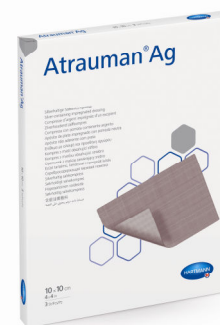

Référence	Taille ou dimensions
499570	5 x 5 cm
499571	5 x 5 cm
499572	10 x 10 cm
499573	10 x 10 cm
499574	10 x 20 cm
499575	10 x 20 cm

Produit

Atrauman® Ag est un pansement barrière non adhérent contenant de l'argent pour le traitement des plaies atraumatiques.

Le tissu de soutien doux et mince s'étend facilement et assure un contact étroit avec la base de la plaie. La surface du tissu et l'imprégnation contrebalancent l'adhérence à la plaie ; par conséquent, le pansement permet d'effectuer les changements de pansement de manière atraumatique. Atrauman® Ag agit comme un pansement barrière contenant de l'argent. L'imprégnation protège les berges de la plaie afin de prévenir la macération ; elle est non médicamenteuse et ne contient pas de paraffine.

Indications / Classification

Atrauman® Ag est indiqué :

- pour le traitement de l'ulcère cruris, de l'ulcère de jambe diabétique et du décubitus,
- pour le traitement des brûlures aiguës jusqu'au deuxième degré.

Atrauman® Ag est un dispositif médical de classe III (TÜV-0123).

Spécifications

Composition :

Tissu de soutien en fibres de polyamide enrobées d'argent élémentaire. L'imprégnation est non médicamenteuse et à base de triglycérides (lipides neutres). L'imprégnation contient les éléments suivants (appellation INCI) : Caprylic / Capric / Stearic Triglyceride, Bis-diglycerol-polyacyladipate-2, Macrogol 2000.

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Individuelle, sous pochette pelable en complexe aluminium.

Accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
499570	5 x 5 cm	1	3	12	360
499571	5 x 5 cm	1	10	12	360
499572	10 x 10 cm	1	3	12	165
499573	10 x 10 cm	1	10	12	165
499574	10 x 20 cm	1	3	6	210
499575	10 x 20 cm	1	10	6	210

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
499570	5 x 5 cm	99 x 14 x 133 mm	222 x 160 x 90 mm	1200 x 800 x 1500 mm
499571	5 x 5 cm	99 x 14 x 133 mm	222 x 160 x 90 mm	1200 x 800 x 1500 mm
499572	10 x 10 cm	188 x 147 x 14 mm	321 x 215 x 90 mm	1200 x 800 x 1500 mm
499573	10 x 10 cm	188 x 147 x 14 mm	321 x 215 x 90 mm	1200 x 800 x 1500 mm
499574	10 x 20 cm	286 x 147 x 14 mm	313 x 174 x 90 mm	1200 x 800 x 1500 mm
499575	10 x 20 cm	286 x 147 x 14 mm	313 x 174 x 90 mm	1200 x 800 x 1500 mm

Stérilisation

Par rayonnements.
Durée de vie : 3 ans.

Précautions d'emploi

Atrauman® Ag doit être utilisé en association avec un pansement secondaire approprié (pansements absorbants ou superabsorbants, pansements en mousse ou gazes, par exemple RespoSorb® Super) conformément aux instructions d'utilisation.

Le traitement avec Atrauman® Ag ne doit pas remplacer un traitement antibiotique requis. En l'absence de données disponibles supportant l'utilisation de ce pansement sur des populations sensibles telles que les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes et en l'absence de données contraires, l'utilisation de ce pansement sur ces populations doit se faire avec précaution et en suivant les recommandations d'un médecin.

Contre-indications

Il est déconseillé d'utiliser Atrauman® Ag sur des patient présentant une allergie connue à l'un des composants. Ne pas utiliser sur les plaies sèches.

Conseils d'utilisation

Voir notice.