

HydroClean® Advance Cavity

Pansement irrigo-absorbant

Référence	Taille ou dimensions	Code EAN
609162	Rond : diamètre 4 cm	4052199300986
609164	Ovale : 4 x 8 cm	4052199301013
609166	Rond : diamètre 5,5 cm	4052199301044
609168	7,5 x 7,5 cm	4052199301075
609172	10 x 10 cm	4052199301105



Produit

HydroClean® Advance Cavity est un pansement hydroactif constitué principalement d'un polyacrylate superabsorbant (SAP) inclus dans des fibres de cellulose et activé (préhumidifié) par la solution de Ringer. Le coussinet est recouvert d'un tricot en polypropylène.

Les pansements HydroClean® Advance Cavity sont conformes aux exigences de la LPPR.

Indications / Classification

HydroClean® Advance Cavity est indiqué pour le soin en milieu humide des plaies sèches, légèrement et modérément exsudatives, et en particulier des plaies dont la cicatrisation est entravée. Ce produit est particulièrement indiqué pour le traitement des plaies chroniques et dont la cicatrisation est difficile lors de la phase de détersion et de granulation.



Le pansement doit être utilisé par des professionnels de santé ou par des personnes formées par des professionnels de santé.

HydroClean® Advance Cavity est un dispositif médical de classe IIb (TÜV - 0123).

Spécifications

Composition :



	la partie centrale est constituée de particules superabsorbantes contenues dans des fibres de cellulose et activées (pré-humidifiées) par la solution de Ringer.
	tricot hydrophobe en polypropylène

Caractéristiques :

HydroClean® Advance Cavity libère la solution de Ringer dans la plaie jusqu'à trois jours. Pendant ce temps, l'irrigation interactive et continue de la plaie a lieu grâce au coussinet du pansement qui absorbe également l'exsudat de la plaie. Le SAP présent dans HydroClean® Advance Cavity inactive les métalloprotéinases matricielles (MMP) qui altèrent la cicatrisation des plaies.

Remboursé LPPR.

Absence de latex*
Absence de phtalates*
Absence de colophane*

*(non ajouté intentionnellement).

Présentation / Conditionnement/ Conditions de stockage

Présentation individuelle sous pochette pelable, puis en boîte.

Accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
609162	Rond : diamètre 4 cm	1	10	6	180
609164	Ovale : 4 x 8 cm	1	10	6	189
609166	Rond : diamètre 5,5 cm	1	10	6	189
609168	7,5 x 7,5 cm	1	10	6	135
609172	10 x 10 cm	1	10	6	77

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton
609162	Rond : diamètre 4 cm	90 x 125 mm	127 x 92 x 50 mm	295 x 142 x 120 mm
609164	Ovale : 4 x 8 cm	105 x 150 mm	152 x 107 x 52 mm	240 x 175 x 180 mm
609166	Rond : diamètre 5,5 cm	105 x 150 mm	152 x 107 x 52 mm	240 x 175 x 180 mm
609168	7,5 x 7,5 cm	125 x 195 mm	197 x 127 x 57 mm	274 x 212 x 194 mm
609172	10 x 10 cm	160 x 210 mm	214 x 164 x 65 mm	511 x 235 x 160 mm

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité).

Stérilisation

A la vapeur.

Péremption

Durée de vie : 3 ans.

Précautions d'emploi

Ne pas découper.
Consulter la notice d'emploi.

Contre-indications

Ne pas utiliser HydroClean® Advance Cavity sur des patients présentant une intolérance à l'un de ses composants.