

RespoSorb® Super

Pansement superabsorbant stérile non adhérent



Référence	Taille ou dimensions
685020	10 x 10 cm
685021	10 x 20 cm
685022	15 x 20 cm
685023	20 x 25 cm
685024	20 x 40 cm

Produit

RespoSorb® Super est un pansement superabsorbant stérile utilisé pour les plaies superficielles à exsudation modérée à sévère. Le coussin absorbant absorbe et retient les exsudats.

Indications / Classification


Pour le traitement à long terme chez l'adulte par des professionnels de santé, en milieu clinique ou à domicile.

RespoSorb® Super convient au traitement des plaies superficielles à exsudation modérée à sévère : plaies aiguës (plaies traumatiques, plaies post-opératoires, plaies lymphatiques, ulcères artériels de la jambe) et plaies chroniques (décubitus / escarres, ulcères veineux ou mixtes de la jambe, plaies tumorales).

RespoSorb® Super peut être utilisé sous des bandages de compression.

RespoSorb® Super est un dispositif médical de classe IIb (TÜV-0123).

Spécifications

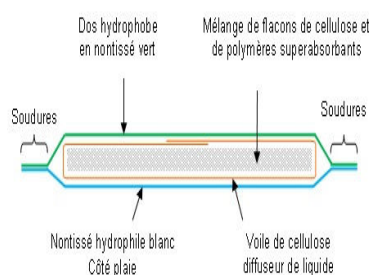

Composition :

RespoSorb® Super est un pansement superabsorbant qui se compose de quatre couches de différents matériaux. Du côté de la plaie, le produit est composé d'un nontissé blanc hydrophile et doux (viscose et polyamide). Le coussin interne du pansement est constitué de flocons de cellulose mélangés à des polymères de polyacrylate retenant les liquides. Ce coussin absorbant est enveloppé dans un nontissé mince qui distribue uniformément le liquide. Sur la face opposée à la plaie, le produit est composé d'un nontissé vert en polypropylène, hydrophobe mais perméable à l'air et permettant l'échange gazeux.

Caractéristiques :

Capacité d'absorption : minimum 140 g/100cm² de coussin absorbant (norme NF EN 13726-1 chapitre 3.2)

Les pansements RespoSorb® Super sont pris en charge par la Sécurité Sociale dans la catégorie des pansements hydrocellulaires superabsorbants.

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
685020	10 x 10 cm	Dimensions du pansement : 12 x 12 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 10 x 10 cm environ
685021	10 x 20 cm	Dimensions du pansement : 12 x 22 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 10 x 20 cm environ
685022	15 x 20 cm	Dimensions du pansement : 17 x 22 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 15 x 20 cm environ
685023	20 x 25 cm	Dimensions du pansement : 22 x 27 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 20 x 25 cm environ
685024	20 x 40 cm	Dimensions du pansement : 22 x 42 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 20 x 40 cm environ



Présence de latex. Le produit ne contient pas de latex. L'emballage (pochette pelable) contient du latex au niveau des soudures uniquement (sauf le format 20 x 40 cm).
Absence de colophane. Absence de phtalates.

Présentation / Conditionnement

Unitaire sous pochette pelable papier / papier (excepté pour le format 20 x 40 cm : emballé sous blister papier / film).

Conditionnés en boîte, puis en carton.

Accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / blister	Nb unités / pochette	Nb blisters / boîte	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
685020	10 x 10 cm	/	1	/	10	6	88
685021	10 x 20 cm	/	1	/	10	6	64
685022	15 x 20 cm	/	1	/	10	6	42
685023	20 x 25 cm	/	1	/	10	6	28
685024	20 x 40 cm	1	/	10	/	5	24

Référence	Dimensions blister	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
685020	10 x 10 cm	/	190 x 162 x 6 mm	169 x 70 x 206 mm	350 x 218 x 224 mm
685021	10 x 20 cm	/	290 x 162 x 6 mm	180 x 70 x 294 mm	1212 x 800 x 1943 mm
685022	15 x 20 cm	/	290 x 212 x 6 mm	219 x 81 x 294 mm	1212 x 800 x 1947 mm
685023	20 x 25 cm	/	350 x 262 x 6 mm	269 x 81 x 354 mm	1200 x 800 x 1947 mm
685024	20 x 40 cm	290 x 140 x 28 mm	/	292 x 143 x 280 mm	1206 x 800 x 1912 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : 3 ans après la date de fabrication.

Précautions d'emploi

- Ne pas découper le pansement.
- Tout traitement de plaies dont le processus cicatriciel est perturbé doit être précédé d'un examen médical visant à évaluer l'état de la plaie et à déterminer l'origine de la tendance au retard de cicatrisation. Le traitement avec RespoSorb® Super ne remplace pas un traitement étiologique du retard de cicatrisation. En présence de signes cliniques d'infection, l'utilisation de ce pansement nécessite la maîtrise préalable de l'infection par un traitement approprié.
- Dans tous les cas, suivre le protocole clinique instauré.
- Pour les pansements conditionnés en sachets pelables papier-papier : le scellage (bande bleue) du sachet pelable contient du latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques !

Contre-indications

Ne pas utiliser RespoSorb® Super sur des plaies sèches ou sur des os, muscles ou tendons exposés.

Ne pas utiliser RespoSorb® Super en cas d'hypersensibilité à l'un des composants.

Conseils d'utilisation

- Sélectionner la taille de RespoSorb® Super pour qu'il corresponde à la dimension de la plaie et que le pansement s'étende d'au moins 1 à 2 centimètres au-delà des berges de la plaie.
- Poser la face blanche de RespoSorb® Super sur la plaie, de manière à ce que le nontissé spécial vert soit opposé à la plaie.
- Fixer le pansement, par exemple avec du ruban adhésif, des bandes de fixation ou, si nécessaire, avec des bandages de compression.
- Le pansement peut rester jusqu'à 5 jours en place sur la plaie en fonction de l'état de la plaie. Changer le pansement si des signes cliniques l'imposent ou lorsque les exsudats apparaissent au niveau des bords du pansement ou s'ils sont perceptibles à travers le nontissé vert supérieur.
- En cas de plaies infectées, une association avec Atrauman® Ag, par exemple, est envisageable.
- Si la quantité des exsudats diminue, il est recommandé d'utiliser un pansement hydroactif approprié (p. ex. HydroTac®).