



Hydrocoll® Pansements hydroactifs

Référence	Taille ou dimensions produit	Code ACL	Code EAN13
900938	10 x 10 cm	7987133	4049500272070
900939	15 x 15 cm	7987699	4049500272087
900940	20 x 20 cm	7987707	4049500272094
900947	5 x 5 cm	4293447	4049500286701
900948	7,5 x 7,5 cm	4293453	4049500286718



Produit

Hydrocoll® est un pansement hydrocolloïde auto-adhésif et absorbant protégé par un film de polyuréthane, permettant les échanges gazeux, mais restant imperméable aux liquides et aux germes, et recouvert de colle acrylate de qualité médicale.

En absorbant l'exsudat de la plaie, l'hydrocolloïde forme un gel qui crée un milieu humide. La couche de gel empêche Hydrocoll d'adhérer à la plaie. Le renouvellement du pansement s'effectue sans léser les tissus de granulation et de ré-épithélialisation, et il est, par conséquent, presque indolore pour le patient.

Hydrocoll est auto-adhésif. La finesse et la souplesse du matériau lui permettent de bien s'adapter aux contours du corps. La surface hydrofuge et imperméable aux souillures d'Hydrocoll facilite les soins corporels quotidiens.

Indications / Classification

Hydrocoll® est particulièrement indiqué dans le traitement des plaies modérément à peu exsudatives.

Hydrocoll® est un dispositif médical de classe IIb (TÜV - 0123).

Spécifications

Composition :

Hydrocoll® est composé de trois couches :

- film en polyuréthane
- hydrocolloïde composé de carboxyméthylcellulose sodique, de polyisobutylène, d'un copolymère à blocs styrolène-isoprène-styrolène, d'un copolymère à blocs styrolène-isoprène
- colle acrylate recouverte d'un papier siliconé

Caractéristiques :

Structure souple semi-transparente.

Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Emballage en blister stérile, présentés en boîte.

Accompagné d'une notice d'emploi.



Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / blister	Nb blisters / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
900938	10 x 10 cm	1	10	8	90
900939	15 x 15 cm	1	10	8	30
900940	20 x 20 cm	1	10	8	30
900947	5 x 5 cm	1	10	8	120
900948	7,5 x 7,5 cm	1	10	8	120

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions blister	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
900938	10 x 10 cm	155 x 177 mm	161 x 21 x 182 mm	377 x 335 x 51 mm	1200 x 800 x 915 mm
900939	15 x 15 cm	204 x 227 mm	211 x 21 x 235 mm	483 x 435 x 51 mm	1200 x 800 x 915 mm
900940	20 x 20 cm	255 x 277 mm	263 x 21 x 285 mm	583 x 539 x 51 mm	1200 x 800 x 915 mm
900947	5 x 5 cm	118 x 138 mm	126 x 21 x 146 mm	312 x 278 x 51 mm	1200 x 800 x 915 mm
900948	7,5 x 7,5 cm	118 x 138 mm	126 x 21 x 146 mm	312 x 278 x 51 mm	1200 x 800 x 915 mm

Stérilisation

Par rayonnement Béta.
Durée de vie : 5 ans.

Précautions d'emploi

Tout traitement de plaies dont le processus cicatriciel est perturbé doit être précédé d'un examen médical visant à évaluer l'état de la plaie et à déterminer l'origine du retard de cicatrisation. Le traitement avec Hydrocoll ne remplace pas un traitement étiologique des troubles de la cicatrisation.

Contre-indications

Hydrocoll ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une allergie à un des composants. Hydrocoll ne doit pas être appliqué sur des zones de dénudements osseux, musculaires ou tendineux. Son utilisation est également contre-indiquée sur les plaies infectées, les mycoses et les brûlures du 3e degré.