

SANGLE HAMAC ECO

- Disponible en jersey et en filet
- Taille unique
- Modèle jersey offert à l'achat d'un lève-personne.



Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation. Cette sangle peut rester sous le patient.



- Sans reste à charge
- Respect de la MDR
- Taille unique

CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE

RÉF.	HA3-RBA-PF-TU (filet) HA-PF-TU (jersey)
OPTION	TAMOV-PF (tête amovible)



RÉGLAGE DES ACCROCHES



Cette sangle Eco propose un seul réglage.

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DECROISÉ
Choix conseillé

TÊTIÈRE (OPTION)

L'ajout de la tête amovible (TAMOV-PF) permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.

