

## HydroTac® Border Multisite

Pansement hydrocellulaire avec gel



<b>Référence</b>	<b>Taille ou dimensions</b>	<b>Code ACL</b>
<b>685823</b>	<b>Diamètre : 11,5 cm</b>	<b>6265623</b>
<b>685829</b>	<b>13 x 16 cm (oval)</b>	<b>6265622</b>

### Produit

HydroTac® Border Multisite est un pansement hydrocellulaire recouvert sur la face externe d'un film en polyuréthane qui permet les échanges gazeux tout en restant imperméable aux liquides et aux bactéries, revêtu d'une couche d'hydrogel. Le gel est composé d'un polymère hybride polyurée-polyuréthane aqueux contenant du propylène glycol. De plus, il comporte une bordure autoadhésive recouverte d'un adhésif polyacrylate.

### Indications / Classification

HydroTac® Border Multisite est particulièrement indiqué pour le soin des plaies durant la phase de granulation et la phase d'épithélialisation légèrement à modérément exsudative. HydroTac® Border Multisite est destiné à être appliqué par des spécialistes du traitement des plaies. Les spécialistes du traitement des plaies peuvent déléguer le changement des pansements aux patients et/ou à leurs proches (non-professionnels sous la supervision de professionnels).

HydroTac® Border Multisite est un dispositif médical de classe IIb (TÜV-0123).

### Spécifications

#### Composition :

Le pansement est composé de la manière suivante :

- un film élastique et perméable aux gaz en polyuréthane
- une mousse douce et absorbante en polyuréthane
- un hydrogel en contact avec la plaie en polymère de polyurée/polyuréthane contenant du propylène glycol
- une feuille couvrante siliconée

L'adhésif est en acrylique

#### Caractéristiques :

Capacité d'absorption : > 0,4 g/cm<sup>2</sup> env.

Force d'adhésivité : > 2 N/25 mm env.

Taux de perméabilité : >= 1000 g/m<sup>2</sup> /24h env.

Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Absence de phtalates.

### Présentation / Conditionnement

Emballé individuellement sous pochette aluminium pelable.

Accompagné d'une notice d'emploi. 1 notice par boîte.



Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
<b>685823</b>	Diamètre : 11,5 cm	1	10	12	60
<b>685829</b>	13 x 16 cm (oval)	1	10	6	90

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
<b>685823</b>	Diamètre : 11,5 cm	170 x 192 mm	176 x 51 x 198 mm	409 x 372 x 174 mm	1200 x 800 x 1890 mm
<b>685829</b>	13 x 16 cm	239 x 185 mm	191 x 51 x 243 mm	396 x 263 x 174 mm	1200 x 800 x 1890 mm

## Stérilisation

Par rayonnement.  
Durée de vie : 3 ans

## Précautions d'emploi

Voir sur la notice.

## Contre-indications

Ne pas utiliser HydroTac chez les patients présentant une intolérance à l'un de ses composants, en particulier aux adhésifs à base de propylène glycol, de polyuréthane ou d'acrylique.