

HydroTac® transparent

Pansements gel en plaque



Référence	Taille ou dimensions	Code EAN
685905	5 x 7,5 mm	4052199273518
685906	10x10 cm	4052199274218
685907	10x20 cm	4052199274256
685908	20x20 cm	4052199274294

Produit

HydroTac® transparent est un pansement hydrogel transparent constitué d'un polymère de polyuréthane hydraté qui contient de la glycérine. Il est recouvert d'un film de polyuréthane qui permet les échanges de vapeur d'eau tout en restant imperméable aux liquides et aux bactéries.

Indications / Classification

HydroTac® transparent est indiqué pour le soin des plaies sèches ou faiblement exsudatives durant la phase de granulation et la phase d'épithélialisation.

HydroTac® transparent est destiné à être appliqué par des spécialistes du traitement des plaies. Les spécialistes du traitement des plaies peuvent déléguer le changement des pansements aux patients et/ou à leurs proches (non-professionnels sous la supervision de professionnels).

HydroTac® transparent est un dispositif médical de classe IIb (TÜV-0123).

Spécifications

Composition :

HydroTac® transparent est constitué de 3 couches :

- Film PU : film de polyuréthane transparent semi-perméable, avec grille imprimée.
- Hydrogel : matrice de polymère à base d'hybride polyuréthane-polyurée avec une teneur en eau d'environ 60 %.
- Feuillet de protection : feuillet de polypropylène bleu, siliconé d'un côté, imprimé avec les numéros 1 et 2.

Caractéristiques :

HydroTac® transparent peut libérer de l'humidité tout en absorbant une quantité limitée d'exsudats. Le milieu humide ainsi entretenu stimule la cicatrisation de la plaie. HydroTac® transparent est transparent et permet un retrait atraumatique.

Sa transparence permet un contrôle visuel de la plaie à tout moment, sans avoir à renouveler le pansement.

Remboursé LPPR.

- Absence de latex.
- Absence de phtalates.
- Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Emballage individuel en pochette pelable.

Accompagné d'une notice d'emploi par boîte.



Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
685905	5 x 7,5 mm	1	10	12	100
685906	10 x 10 cm	1	10	12	42
685907	10 x 20 cm	1	10	6	80
685908	20 x 20 cm	1	10	3	120

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
685905	5 x 7,5 mm	155 x 106 mm	112 x 32 x 160 mm	338 x 242 x 115 mm	1200 x 800 x 1300 mm
685906	10 x 10 cm	180 x 155 mm	161 x 32 x 185 mm	388 x 340 x 115 mm	1200 x 800 x 955 mm
685907	10 x 20 cm	277 x 155 mm	161 x 32 x 282 mm	340 x 295 x 115 mm	1200 x 800 x 1300 mm
685908	20 x 20 cm	277 x 255 mm	263 x 32 x 282 mm	297 x 286 x 115 mm	1200 x 800 x 1875 mm

Stérilisation

Par rayonnement.
Durée de vie : 3 ans.

Précautions d'emploi

Tout traitement de plaies dont le processus cicatriciel est perturbé doit être précédé d'un examen médical visant à évaluer l'état de la plaie et à déterminer l'origine du retard de cicatrisation. Le traitement avec HydroTac® transparent ne remplace pas un traitement étiologique des troubles de la cicatrisation.

Contre-indications

Ne pas utiliser HydroTac® transparent chez les patients présentant une intolérance à l'un de ses ingrédients, en particulier aux adhésifs à base de polyuréthane, de glycérine. Ne pas utiliser en présence d'une infection clinique, ni sur des brûlures du 3e degré.

Conseils d'utilisation

Voir notice.