


SECURFORM - Tapis d'amortissement

| Désignation | Référence |
|-----------------|-----------|
| Tapis Securform | 07/2900 |

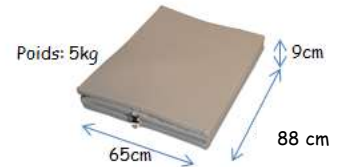

Principes d'utilisation :

Le tapis d'amortissement Securform s'utilise pour prévenir les blessures liées aux chutes du lit.

- **Sécurité optimum :**
 - 60% de l'impact amorti
 - Lanières de liaison avec le lit pour garantir le bon positionnement
 - Dessous anti-glisse
 - Grande zone de couverture au sol : 195 cm x 88 cm
 - Très bon confort: Grâce au Pharmatex et à la mousse viscoélastique
 - Excellente stabilité en position debout qui permet de lever le patient tout en le protégeant en cas de chute.
- **Confort des aidants :**
 - Permet aux aidants de ne plus enlever le tapis pour accéder au patient
 - Seulement 3 cm de hauteur afin de limiter les risques de croche-pieds
 - Déhoussable et lavable en machine
 - Rapide à installer, facile à ranger et à transporter grâce à sa compacité et son clip de fermeture

Conseils d'installation :

- Bien veiller à positionner les sangles sur une partie fixe du lit
- Ne pas marcher sur le tapis avec des chaussures à talons
- Ne pas laisser durablement la personne sur le tapis



Composition :

- Mousse : Polyuréthane Viscoélastique 80g/m³ – Classement au feu M4
- Housse : Pharmatex 60% Polyuréthane, 40% Polyester – Classement au feu CRIB 5
- Tissu anti-glisse : 57% Polyuréthane, 43% Polyester
- Boucles : 100% Acétal
- Sangles : 100% Polypropylène

Entretien :

- Mousse : Eponge et eau savonneuse – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol
La housse ne doit être remplacée qu'une fois la mousse parfaitement sèche.

- Housse : *    

* Conseillé à 60°C pour une bonne tenue du produit dans le temps

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.