

ACTI'SEPTYL DSR WIPES

Mains et surfaces
Lingettes désinfectantes
sans rinçage



AVANTAGES

- Sans rinçage, même en surfaces alimentaires
- Pour mains et surfaces
- Large spectre d'activité en temps réduit



APPLICATION

Désinfectant pour les mains et surfaces, prêt à l'emploi et sans rinçage même pour les surfaces alimentaires.

MODE D'EMPLOI

Tirer horizontalement une lingette jusqu'à la prédécoupe. Couper d'un coup sec. Frotter la surface préalablement nettoyée pendant 30s à 5min selon l'activité désinfectante recherchée. Ne pas rincer, laisser sécher intégralement.

Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. Bien refermer le conditionnement après usage pour éviter le dessèchement des lingettes.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Lingettes
Taille lingettes	125 x 200 mm
Couleur :	Incolore
Odeur :	Alcoolisée
pH :	6,00
Péremption	2 ans

TYPE DE PRODUIT

TP01, TP02, TP04.

SUBSTANCES ACTIVES

Ethanol (n°CAS 64-17-5) = 70,4% (m/m).

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

En conditions de propreté à 20°C :

Bactéricide : EN 1276 (2min), EN 13697 (2min), EN 13727 (30s). Efficace sur Listeria et Salmonelle.

Levuricide : EN 1650 (2min), EN 13697 (2min), EN13624 (30s).

Fongicide : EN 1650 (5min), EN 13697 (5min).

Virucide : EN 14476 sur BVDV (30s), H1N1, PVR, Norovirus (60s), Coronavirus, Adénovirus (90s), Poliovirus (5min).

Friction hygiénique des mains : EN 1500 (60s).

CONDITIONNEMENT

Boite de 120 lingettes

LB950095

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

