

# NOTICE D'UTILISATION : ROLLATOR 3 ROUES

REF 216101A




Le rollator 3 roues (réf. 216101A) est livré avec un panier métallique avec couvercle plastique, deux freins avec poignées ergonomiques. Il s'adapte à la taille de l'utilisateur grâce à ses 2 poignées réglables en hauteur. Il est facilement pliable et permet d'obtenir un encombrement minimum. Lire attentivement les instructions et les mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice.

## Caractéristiques techniques :

- Dimension hors tout : L. 57,5 x l. 70 cm
- Dimension plié : 24 cm
- Hauteur : 82,5 à 92,5 cm
- Diamètre des roulettes : 19 cm
- Couleur : Argent
- Matière : métal
- Poids : 6,5 kg
- Poids maximal supporté : 110 kg
- Code LPP : **6256108**

## Instruction d'assemblage :

- Le rollator est livré plié.
- Déplier complètement et bloquer avec la butée centrale
- Insérer la poignée avec frein dans le tube adapté. Insérer le boulon (A) dans la cavité de l'intérieur vers l'extérieur du rollator. Fixer la rondelle de serrage (B) et le levier de serrage (C).
- Ajuster la hauteur de la poignée et la fixer en vissant le levier de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre. (levier coté extérieur comme sur fig1)
- Répéter l'opération pour le côté opposé.
- Attention : les 2 poignées doivent être positionnées au même niveau.
- Poser le panier métallique orienté vers l'avant à l'aide des deux ergots.
- Retirer les protections en plastique sur les roues.

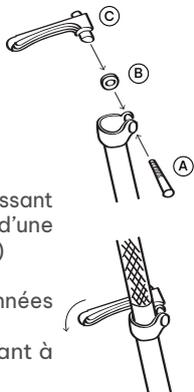

## Recommandations d'utilisation :

- Ce rollator ne peut être utilisé par des patients dont le poids excède 110 kg.
- L'utilisation de ce rollator sur un sol en pente ou irrégulier est à proscrire sous peine de basculement du patient.
- La première mise en service doit se faire avec une personne habilitée qui procédera aux réglages pour adapter le produit à la morphologie de l'utilisateur.
- Avant chaque utilisation, vérifier que le rollator est complètement déplié et verrouillé avec la butée centrale, et que les deux poignées sont correctement fixées et solidaires de la base.
- Positionner l'appareil devant soi et tenir les poignées tout en maintenant les freins. (fig 2) Libérer les freins lorsque le corps est en équilibre.
- Pour une station debout prolongée, immobiliser le rollator en poussant le frein vers le bas en position verrouillée. (fig 3)

## Entretien régulier :

- Essuyer le rollator avec un chiffon doux
- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d'eau de Javel qui peuvent endommager ou décolorer le produit
- Vérifier régulièrement le serrage des poignées et l'efficacité du freinage.
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies par les **Laboratoires Euromedis**.

## Conditions de garantie :

La structure mécanique de ce produit est garantie 2 ans, dans le cadre d'une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas à un matériel réparé ou modifié sans l'accord des **Laboratoires Euromedis**. La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs ou indirects.

