
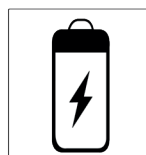
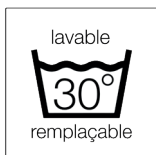


## FAUTEUIL LIBERTY e II

VHP à pousser

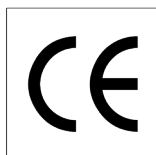

Le LIBERTY e II permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons.

Usage intérieur exclusif. Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables à 30° permettant un allègement des points de pression

Le LIBERTY e II est un produit Français exclusif sur le marché, D.M. agréé par le CERAH.

### caractéristiques :

hygiène	modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables à 30°
modules de couettes	remplacement aisé en cas d'usure
composition de la couette	garnie fibre creuse siliconée pour un allègement des points de pression
assise	composée de mousse HR 35 (Haute Résilience)
positions	inclinaison électrique à 30° : Assise / Dossier / Repose jambes synchronisés.
sécurité	Normes non-feu revêtement PVC/PU : M2 – 1021-1 – 1021-2 et biocompatible Normes non-feu revêtement Velours et Tissus chinés : 1021-1 – 1021-2 et biocompatible. Velours galène 1021.1 uniquement
revêtements	velours déperlant, PVC/PU, tissus chinés
largeurs d'assise	38, 44, 50, 56 & 65 cm
hauteur sol / assise	48 cm
largeur hors tout	69 cm (T4), 72 cm (T7), 73 cm (T10), 79 cm (T13), 88 cm (T16)
options disponibles	câle-tête fabrication spéciale, appareil de soutien partiel de la tête, cale-tronc ajustable, harnais, kit batterie, assise Classe II, tablette latérale
poids maximum utilisateur	130 kg
poids du fauteuil	37 kg
garanties	fauteuil 2 ans - vérin 5 ans
franco à l'unité	oui
fabrication	France - région grand Est- Aube



## FAUTEUIL LIBERTY e II

### dimensions en cm

largeurs d'assise	profondeurs d'assise	largeurs hors-tout	hauteur d'assise	hauteur hors-tout	poids du fauteuil	poids maxi utilisateur
380 mm	480 mm	690 mm	500 mm	1350 mm	37 kg	130 kg
440 mm		720 mm				
500 mm		730 mm				
560 mm		790 mm				
650 mm		880 mm				

tolérance dimensionnelle et pondérale + 15 mm / 1,5 kg

### utilisation de la télécommande 2 boutons



Les deux boutons permettent de bénéficier de la fonction **AUTO-NOMIE** électrique (avant/arrière), permettant de gérer soi-même son inclinaison.

**Bouton BLANC** : Avant

**Bouton VERT** : Arrière

### aide à l'entretien

La couette de votre fauteuil est **amovible** et peut être **lavée en machine à 30°**. Nous vous conseillons lors du lavage de placer votre couette dans un filet à linge afin de conserver leur aspect d'origine.

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers.

Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, **vous devez l'entretenir régulièrement** de la manière suivante :

- Contrôler et nettoyer les roues. Remplacer celles-ci si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôler les freins.
- Contrôler le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettoyer-le.
- Remplacer le revêtement si nécessaire.

## LES COLORIS



1 2 3

**PVC / PU imperméable non-feu M2** 🔥

- 1- ebène
- 2- cacao
- 3- framboise



4 5 6

**velours déperlant non-feu EN 1021.1 & 1021.2** 🔥

- 4 - velours marron
- 5 - black édition
- 6 - galène (1021.1 uniquement)



7 8

**tissus chinés non-feu EN 1021.1 & 1021.2** 🔥

- 7 - gris chiné
- 8 - marron chiné

## LES OPTIONS

câle-tête fabrication spéciale



appareil de soutien partiel de la tête



cale-tronc ajustable



harnais



assise Classe II



tablette latérale



kit batterie

