
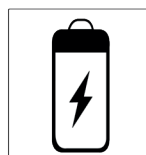


FAUTEUIL MISTRAL e

VHP à pousser

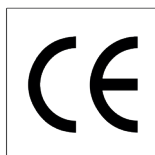

Le MISTRAL e, est un Dispositif Médical à usage intérieur exclusif. Il permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons. L'assise, le dossier et le repose-jambes sont synchronisés.

Le MISTRAL e est un produit Français exclusif sur le marché, D.M. agréé par le CERAH.

caractéristiques :

autonomie	inclinaison électrique à 30° : Assise / Dossier / Repose jambes synchronisés
+ produit	repose-pieds rabattables pour un plus grand confort en position inclinée
assise	composée de mousse HR 35 (Haute Résilience)
sécurité	Normes non-feu revêtement PVC/PU : M2 – 1021-1 – 1021-2 et biocompatible Normes non-feu revêtement Velours et Tissus chinés : 1021-1 – 1021-2 et biocompatible
revêtements	velours déperlant, PVC/PU, tissus chinés
largeurs d'assise	38, 44, 50, 56 & 65 cm
hauteur sol / assise	48 cm
largeur hors tout	69 cm (T4), 72 cm (T7), 73 cm (T10), 79 cm (T13), 88 cm (T16)
options disponibles	appareil de soutien partiel de la tête, cale-tronc ajustable, kit batterie, cale-tête fabrication spéciale, harnais, assise Classe II, tablette latérale
poids maximum utilisateur	130 kg
poids du fauteuil	38 kg
garanties	fauteuil 2 ans - vérin 5 ans
franco à l'unité	oui
fabrication	France - région grand Est- Aube



FAUTEUIL MISTRAL e

dimensions en cm

largeurs d'assise	profondeurs d'assise	largeurs hors-tout	hauteur d'assise	hauteur hors-tout	poids du fauteuil	poids maxi utilisateur
380 mm	480 mm	690 mm	500 mm	1350 mm	38 kg	130 kg
440 mm		720 mm				
500 mm		730 mm				
560 mm		790 mm				
650 mm		880 mm				

tolérance dimensionnelle et pondérale + 15 mm / 1,5 kg

utilisation de la télécommande 2 boutons



Les deux boutons permettent de bénéficier de la fonction AUTONOMIE électrique (avant/arrière), permettant de gérer soi-même son inclinaison.
Bouton BLANC : Avant
Bouton VERT : Arrière

aide à l'entretien

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers.


Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, vous devez l'entretenir régulièrement de la manière suivante :

- Contrôler et nettoyer les roues. Remplacer celles-ci si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôler les freins.
- Contrôler le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettoyer-le.
- Remplacer le revêtement si nécessaire.

LES COLORIS



1 2

PVC / PU imperméable non-feu M2 
 1 - cacao
 2 - framboise




3

velours déperlant non-feu EN 1021.1 & 1021.2 
 3 - velours marron



4

tissus chinés non-feu EN 1021.1 & 1021.2 
 4 - gris chiné

LES OPTIONS

câle-tête fabrication spéciale



appareil de soutien partiel de la tête



cale-tronc ajustable



harnais



assise Classe II



tablette latérale



kit batterie

